

Feuerwehr:

Defibrillator "ZOLL AED plus" - Funktions- und Prüfblatt

Jahr						
Monat						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
Dezember						

Monatliche Funktionskontrolle (ausgeschaltetes Gerät):

- Sichtfenster prüfen (grün)
- Kein Batterie-Warnton

Jährliche Prüfungen (April und Oktober):


- Gerät einschalten
- Prüfung der Funktionen bis zur Aufforderung "Elektrode aufkleben"
- Gerät ausschalten
- Sichtfenster prüfen (grün)
- Kein Batterie-Warnton


ZOLL AED Plus


Wartung ZOLL AED Plus

Damit der Defibrillator jederzeit einsetzbar ist, müssen diese Punkte wöchentlich überprüft werden:


1. Status des Gerätes überprüfen.


= Gerät einsatzbereit


= Gerät nicht einsatzbereit



2. Haltbarkeit der Elektrode überprüfen.
(Bei Nichtgebrauch: 5 Jahre)



Haltbarkeitsdatum der Elektrode (Jahr-Monat-Tag)

3. Wird der Defibrillator in einem Wandkasten mit batteriebetriebenen Alarm aufbewahrt wird, muss die Batterie des Alarms jährlich ausgetauscht werden.

Batteriewechsel

Das Gerät wird mit zehn Lithium-Mangan-Dioxid-Batterien des Typs 123A betrieben, die auch in Fotoblitzgeräten eingesetzt werden. Bei Nichtgebrauch des Defibrillators beträgt die Betriebszeit der Batterien 5 Jahre. Falls Sie mit dem Gerät defibrillieren, verkürzt sich die Betriebszeit. Im Statusfenster erscheint entsprechend früher ein rotes „X“. Wenn Sie das Gerät dann einschalten ertönt die Aufforderung „Batterien wechseln“.

Für den Batteriewechsel sind diese Schritte durchzuführen:

1. Sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Batteriefach auf der Geräterückseite mit passendem Werkzeug öffnen.
Durch Herunterdrücken der beiden Laschen die Arretierung lösen (siehe Abb. 1), anschliessend den Deckel anhand der entstandenen Fuge anheben. (siehe Abb. 2)
3. Alte Batterien entfernen und nach geltenden Vorschriften entsorgen.
4. Neue Batterien einsetzen. Polarität beachten! (siehe Abb. 3)
5. Nach Einsetzen der Batterien auf die Aufforderung „Nach Batteriewechsel Taste drücken“ warten und die Test-Taste im Batteriefach drücken. (siehe Abb. 4)
6. Deckel wieder einsetzen.
7. Neues Batterie-Siegel ankleben und Datum (Monat - Jahr) eintragen. (siehe Abb. 5)

