

VERWENDERINFORMATION

Besondere Hinweise für die Verwendung von Mund-Nasen-Masken Typ „M“:

Größe: Einheitsgröße

Verwendung

Diese Mund-Nasen-Maske bietet nur begrenzten Schutz vor infektiösen Tröpfchen und ist weder ein Medizinprodukt noch eine persönliche Schutzausrüstung.

Die Maske ist ausschließlich für die persönliche Verwendung bestimmt und somit nicht als Ersatz für Schutzausrüstung geeignet, wie Sie im Ansteckungsbereich von Infektionen und anderen Schadstoffen im Arbeits- und Gesundheitsschutz getragen werden muss.

Vor und nach der Verwendung sind Gesicht und Hände mit Seife zu waschen oder sollten mit einem geeigneten Desinfektionsmittel gereinigt werden.

Bei der Benutzung ist auf gute Passform und ausreichenden Abschluss an Mund, Nase, Kinn und Halsbereich zu achten.

Warnhinweise

Bei Durchfeuchtung ist die Maske rechtzeitig abzusetzen bzw. gegen eine trockene Maske zu tauschen.

Da es schnell zu einer Kontamination mit infektiösen Tröpfchen u.a. kommen könnte, können Gesundheitsschäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei sichtbaren Beschädigungen ist die Maske sofort auszusondern.

Werden die Masken anderweitig getragen (z. B. als Arbeitsschutz), dann erfolgt dies eigenverantwortlich durch den Verwender.

Reinigung, Lagerung und Entsorgung

Die Maske kann folgendermaßen gewaschen und getrocknet werden:



Waschmittel ohne optische Aufheller verwenden, keinen Weichspüler verwenden.

Die Maske ist in einem sauberen Bereich schmutz- und kontaminationsgeschützt aufzubewahren.

Die Maske kann über den regulären Hausmüll entsorgt werden.

TEXPORT® HandelsgesmbH

Franz Sauer Str. 30, A-5020 Salzburg